

Installieren Sie die Mastatest® Lapbox™ in 3 einfachen Schritten via Ethernet (LAN):

1. LAPBOX INSTALLIEREN

- Klappen Sie den Bildschirm auf, indem Sie ihn unten vorsichtig herausziehen. (Zum Zusammenklappen drücken Sie die silbernen Knöpfe auf beiden Seiten der Lapbox.)
- Schließen Sie die Lapbox mit den mitgelieferten Kabeln an Ethernet (LAN) und Stromquelle an (für eine Verbindung über WiFi siehe umseitig).
- Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Zum Ändern der Sprache scrollen Sie vom Hauptmenü aus:
 - mit 3x  zu **Configure Lapbox**, dann .
 - weiter mit 2x  zu **Select Language**, dann .
 - Mit  bis zur gewünschten Sprache, dann .
 - Zurück zum Hauptmenü: 2x  3x .

2. REGISTRIEREN SIE IHRE LAPBOX

(Hinweis: Falls bereits abgeschlossen, überspringen Sie diesen Schritt)

- Melden Sie sich im Portal an oder erstellen Sie ein Konto unter: vetoquinol.mastatestsystem.com.
- Wählen Sie im Menü „Mein Konto“, dann „Neue Lapbox registrieren“. Geben Sie dann folgende Daten ein:
 - Die Lapbox-ID: Hauptmenü mit 2x  bis zu **Lapbox Informationen**, dann .
 - Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite der Lapbox.
- Zurück zum Hauptmenü: 1x  2x .

Für mehr Informationen in Ihrer Sprache DE/EN/FR/NL/IT/PL/PT/SP gehen Sie auf vetoquinol-mastatest.com/how-to-use oder scannen Sie den QR-Code.



3. VERBINDUNG PRÜFEN

- Prüfen Sie, ob dieses Symbol  rot und dieses  grün auf dem Bildschirm leuchtet.
 - Testen Sie die Cloud-Verbindung: Lapbox-Hauptmenü nach unten  bis **Test Upload to Cloud**, dann .
 - Mit  zurück zum Hauptmenü.
- Die Lapbox ist jetzt einsatzbereit!**

PFLEGE UND HINWEISE

- Für eine optimale Leistung verwenden Sie die Lapbox innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von 5–30 °C.
- Stellen Sie die Lapbox auf einen sauberen, trockenen Tisch und gehen Sie vorsichtig damit um, zum Schutz der innenliegenden Kamera.
- Halten Sie Innen- und Außenflächen der Lapbox mit einem feuchten Tuch (nur Wasser) sauber.
- Lagern Sie die Mastatest-Kartuschen bei 2–8 °C und verwenden Sie diese vor Ablauf des Verfallsdatums.

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen die Verbindung über Ethernet (LAN) – siehe oben.

Installieren Sie die Mastatest® Lapbox™ in 4 einfachen Schritten via WiFi:

Starten Sie vom Lapbox-Hauptmenü (Spracheinstellungen finden Sie unter LAN-Installation 1.)

1. FÜR WIFI KONFIGURIEREN

- Scrollen Sie nach unten 3x  zu **Lapbox Konfiguration**, dann .
- Wählen Sie **Internetverbindung festlegen**, dann .
- Scrollen Sie nach unten 1x  zu **WiFi einschalten**, dann .
 - Lapbox startet neu.

2. NETZWERK-NAMEN AUSWÄHLEN (SSID)

- Scrollen Sie nach unten 3x  zu **Lapbox Konfiguration**, dann .
- Scrollen Sie mit  zu **WiFi-Verbindung einstellen**, dann .
-  um nach Netzwerken zu suchen, navigieren Sie mit  zu Ihrem Netzwerk, dann .
- Mit 2x  zu **WiFi-Verbindung einstellen**.
Hinweis: > -65dBm und 2.4 GHz WiFi erforderlich

3. NETZWERKPASSWORT EINGEBEN

- Scrollen Sie mit  zu **WiFi Passwort eingeben**, dann .
- Geben Sie das WiFi-Passwort ein.   zum Zeichen auswählen . Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **lange** auf .
- Zum Speichern drücken Sie erneut .
- Zurück zum Hauptmenü: 2x  3x .

4. VERBINDUNG PRÜFEN

- Prüfen Sie, ob dieses Symbol  rot und dieses  grün auf dem Bildschirm leuchtet.
 - Testen Sie die Cloud-Verbindung: Lapbox-Hauptmenü nach unten  bis **Test Upload to Cloud**, dann .
 - Mit  zurück zum Hauptmenü.
- Die Lapbox ist jetzt einsatzbereit!**

Für mehr Informationen in Ihrer Sprache DE/EN/FR/NL/IT/PL/PT/SP gehen Sie auf vetoquinol-mastatest.com/how-to-use oder scannen Sie den QR-Code.

