



ANLEITUNG FÜR DIE KLINISCHE / CLINICAL-KARTUSCHE (EUP 5)

Mastatest® Befüllen der Kartusche

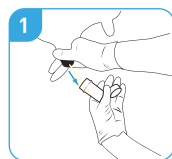


Milchprobe nehmen

Nehmen Sie eine aseptische Milchprobe ohne Konservierungsmittel (siehe Anwender-Videos).

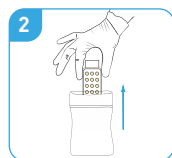


Kartusche auspacken

Ziehen Sie saubere Handschuhe an und nehmen Sie die Kartusche aus der Verpackung.

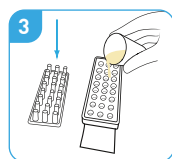


Befüllen der Kartusche

Nehmen Sie den Deckel von der Kartusche ab und achten Sie darauf, dass Sie die Innenseiten des Tests nicht berühren. Füllen Sie die Milchprobe ein, bis alle Vertiefungen bedeckt sind.

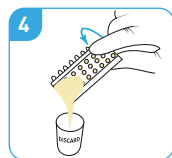


Überschuss verwerfen

Gießen Sie die überschüssige Milch durch seitliches Kippen ab und werfen Sie den Überschuss.

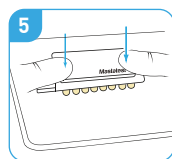


Deckel aufsetzen

Setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie diesen fest nach unten. Beschriften Sie den Deckel mit den Angaben zur Kuh.

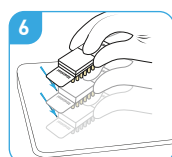

Probe klopfen


Klopfen Sie die Kartusche 2-3-mal kräftig auf einen harten Untergrund. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Luftblasen sichtbar sind.

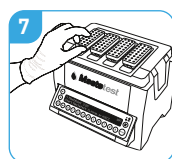

Kartusche in Lapbox™ einsetzen

Legen Sie die Kartusche mit dem QR-Code nach unten in Richtung der Rückseite der Lapbox™ ein.

Mastatest® Test starten

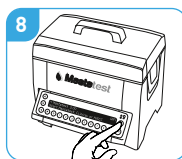

Mastatest® Test starten
siehe unten stehend

1. Starten Sie das Gerät:

- Wählen Sie im Hauptmenü der Lapbox **Start Mastatest** .
- Wählen Sie einen freien Platz: Wenn der erste freie Platz verwendet werden soll,  oder scrollen Sie , um einen anderen Platz auszuwählen, bestätigen mit .

2. Wählen Sie einen Testtyp aus:

- für **Klin. Kartuschen a.** oder **c.**
- für **HiSCC Kartuschen b.** oder **d.**

- a. **Clinical**  oder
- b. 1 x  **HiSCC**  oder
- c. 2 x  **QuickCM**  oder
- d. 3 x  **QuickSCC** 

HINWEIS: 2.a und 2.b sind BoxStart und WebStart Optionen.
2.c und 2.d sind QuickStart Optionen.
Hier gehen Sie direkt zu Punkt 4.c .

3. Wählen Sie (wenn Clinical oder HiSCC gewählt wurde):

- a. **BoxStart**  oder
- b. 1 x  **Webstart** 

4.a (wenn BoxStart gewählt wurde):

- Geben Sie die **Kuhnummer** ein (z.B. 00123) und scrollen , um das **Euterviertel** auszuwählen .
- Bei HiSCC wiederholen Sie diesen Schritt für Probe 2.

4.b (wenn WebStart gewählt wurde):

- Gehen Sie zum Starten des Tests nun auf vetoquinol.mastatestsystem.com und starten Sie den Test entsprechend des ausgewählten Testplatzes (1,2,3 oder 4)

4.c (wenn QuickCM oder QuickSCC gewählt wurde):

- Geben Sie die Testdetails innerhalb von 21 h unter vetoquinol.mastatestsystem.com ein

NÄCHSTE SCHRITTE:

- Countdown-Timer zeigt die verbleibende Testzeit an
- Ergebnisse: automatische E-Mail innerhalb 24 h
- Weitere Tests können unabhängig voneinander gestartet werden

Für mehr Informationen in Ihrer Sprache
DE/EN/FR/NL/IT/PL/PT/SP gehen
Sie auf vetoquinol-mastatest.com/how-to-use
oder scannen Sie den QR-Code.

