



Per le informazioni nella tua lingua vetoquinol-mastatest.com/how-to-use
Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Configura il Lapbox™ di Mastatest® in 3 semplici passaggi:

1. INSTALLARE IL LAPBOX E SELEZIONARE LA LINGUA

- Piega lo schermo tirandolo delicatamente dal basso (per richiudere, premi i pulsanti color argento posti ai lati del Lapbox)
- Collega il Lapbox a Internet (Ethernet - LAN) e alla fonte di alimentazione utilizzando i cavi in dotazione (per connettersi tramite WiFi vedi sul retro)
- Scorri verso il basso    per visualizzare [Configure Lapbox](#) poi premi 
- Scorri verso il basso    per visualizzare [Select Language](#) poi premi 
- Scorri verso il basso    per visualizzare [Italiano](#) poi premi 
- Torna indietro   e scorri in alto    fino al menu principale

2. REGISTRARE IL TUO LAPBOX *(N.B. se la registrazione è già stata completata, salta questo passaggio)*

- Accedi o crea un account sul portale vetoquinol.mastatestsystem.com
- Dal menu seleziona [Il mio Account](#), quindi [Registra Nuovo Lapbox](#). Quindi inserisci:
 - ID lapbox (dal menu principale del Lapbox, scorri in basso    per visualizzare [Informazioni Lapbox](#) poi premi 
 - Numero di serie (sul retro del Lapbox)

3. CONTROLLARE LA CONNESSIONE

- Controlla che la spia verde sul lato destro del display del Lapbox sia accesa 
- Verifica la connettività al cloud (dal menu principale scorri in basso,   seleziona [Test di caricamento nel Cloud](#), quindi premi 

Il Lapbox è pronto all'uso!

CURA DEL DISPOSITIVO

- Utilizza il Lapbox a temperatura ambiente compresa tra 5 e 30°C per prestazioni ottimali
- Posiziona il Lapbox su un piano pulito e asciutto e maneggialo con cura per proteggere la fotocamera all'interno
- Conserva le cartucce Mastatest a 2-8°C e utilizzale prima della data di scadenza
- Mantieni pulite le superfici interne ed esterne con un panno umido (solo acqua)

CONNESSIONE VIA WiFi

(N.B.: si consiglia l'uso di una Ethernet - vedere Pagina 1 per la connessione via Ethernet)

A partire dal menu principale del Lapbox:

1. Configurazione WiFi

- Scorri in basso    fino a **Configurare Lapbox**, poi premi 
- Seleziona **Imposta connessione Internet** poi premi 
- Scorri in basso  fino a **Imposta WiFi** poi premi  e attendi il riavvio

2. Configurazione rete SSID

- Scorri in basso    fino a **Configurare Lapbox** poi premi 
- Seleziona **Imposta connessione Internet** poi premi 
- Scorri in basso  fino a **Configura connessione WiFi** poi premi 
- Attendi la fine della scansione poi scorri in basso  scegli la rete e premi  per selezionarla
- Torna indietro   a **Configura connessione WiFi**

N.B.: sono richiesti WiFi > -65 dBm e 2,4 GHz

3. Immettere la password di rete

- Scorri in basso  fino a **Imposta password WiFi**, quindi 
- Immetti la password utilizzando   e  per selezionare i caratteri. Premi a lungo  al termine
- Premi di nuovo  per salvare
- Torna indietro   e scorri in alto    fino al menu principale

4. Controllare la connessione

- Scorri in basso  fino a **Test di caricamento nel Cloud**, quindi premi 
- Scorri in alto  per tornare al menu principale

Per le informazioni nella tua lingua:

www.vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español,
Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

