



Para obter informações no seu idioma [vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)  
Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

## Configurar a Lapbox™ do Mastatest® em 3 etapas simples:

### 1. INSTALAR

- Para dobrar o ecrã, puxe-o por baixo (para dobrar, prima os botões prateados de cada lado da Lapbox)
- Ligue a Lapbox à ethernet (LAN) e à alimentação utilizando os cabos fornecidos (para ligar através de WiFi, consulte a página 2)
- O idioma predefinido é o inglês. Para alterar, pressione no menu inicial:
  -    para configurar Lapbox ,   para Selecionar linguagem  depois  para seleccionar 
  - Para regressar ao menu inicial:    

### 2. REGISTAR

- Faça Login, ou crie uma nova conta no site [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com)
- Acesse ao menu do site, seleccione *A minha conta*, de seguida clique em *Registar nova Lapbox*. Introduza:
  - Lapbox ID (através do menu da Lapbox,   para seleccionar a *Informação da Lapbox*  )
  - Número de série (na parte de trás da Lapbox)
- Na Lapbox, seleccione    para voltar ao menu inicial

### 3. VERIFICAR A LIGAÇÃO

- Verifique que os símbolos aparecem na cor vermelha  e verde  no visor
- Pressione  para seleccionar *Testar carregamento para nuvem*, depois 
- Se for bem sucedido, a Lapbox está pronta a ser utilizada.  para regressar ao menu inicial

***A Lapbox está pronta para ser usada!***

### CUIDADOS

- A temperatura ambiente onde se encontra a Lapbox deve estar entre 5-30°C para um melhor desempenho
- Coloque a Lapbox numa secretária limpa e seca e manuseie-a com cuidado para proteger o interior da câmara
- Mantenha as superfícies internas e externas limpas com um pano húmido (apenas água)
- Conserve os cartuchos entre 2-8°C. Utilize-os antes de terminar o prazo de validade.

## CONECTAR VIA WiFi

(NB: recomenda-se o uso de ethernet - ver página 1 para ligação via ethernet)

A partir do menu inicial da Lapbox

### 1. Configurar WiFi

- Pressione    para *Configurar Lapbox*, 
- Seleccione *Definir Conexão com a Internet*, 
- Pressione  para *Definir WiFi*,  aguarde que a Lapbox reinicie 

### 2. Configurar SSID de rede

- Pressione    to *Configurar Lapbox*, depois 
- Pressione  to *Configurar conexão WiFi*, depois 
-  para procurar redes, depois pressione  para a sua rede, e  para a seleccionar
- Volte atrás   para *Configurar conexão*

NB requerida: > -65dBm, and 2.4 GHz WiFi

### 3. Coloque a senha de rede

- Pressione  to *Definir senha para WiFi*, depois 
- Inserir senha utilizando   e  para seleccionar os caracteres. Pressione  por muito tempo quando completo
- Pressione  novamente para guardar
- Pressione      para regressar ao menu inicial.

### 4. Verificar ligação

- Pressione  para *Testar carregamento para nuvem*, depois 
-  para voltar ao menu inicial

Para obter informações no seu idioma  
[www.vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](http://www.vetoquinol-mastatest.com/how-to-use) Deutsch,  
Français, English, Español,  
Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

