



## Remplissez une cartouche Mastatest®.

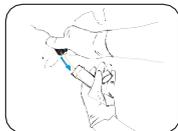


Prélever un échantillon de lait propre  
(voir vidéos utilisateur)




Mettez (Mettre) des gants propres  
et retirez (retirer) la cartouche de  
l'emballage

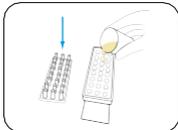


Retirez (retirer) le couvercle de la  
cartouche et remplir la cartouche à  
moitié avec du lait.

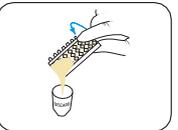

Verser le surplus de lait et jeter

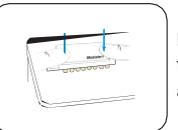

Remettre le couvercle en le poussant  
fermement et étiqueter le couvercle  
avec les informations de la vache

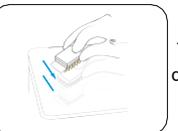

Tapoter fermement 2-3 fois, en répétant si  
des bulles d'air sont visibles dans les puits



Insérez la cartouche dans la Lapbox™ avec  
les flèches dirigées vers l'arrière et remettre le  
couvercle en place.



[vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)

Deutsch, Français, English, Español, Italiano,  
Portuguese, Polski, Nederlands

## Démarrer Mastatest®

### Pour commencer:

- Dans le menu principal de Lapbox, sélectionner **Démarrer le Mastatest**
- Sélectionner l'emplacement Lapbox utilisé : Si le premier emplacement libre est utilisé , ou faire défiler pour sélectionner et

### Option 1: BoxStart

- Sélectionner le type de test :
  - Pour l'examen clinique
  - Pour HiSCC
  - Sélectionner **BoxStart**

Saisir le numéro de la vache (par exemple 00123)

Faire défiler vers le bas pour sélectionner le quartier

Confirmer le début

### Option 2: Démarrage rapide

- Faire défiler vers le bas pour sélectionner le type de test :
  - Pour l'examen clinique **QuickCM**
  - Pour HiSCC **QuickSCC**
- Entrer les détails du test sur [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com) dans les 21 heures

### Prochaines étapes:

- Le compteur affiche le temps restant
- D'autres tests peuvent être commencés indépendamment
- Résultats envoyés par e-mail dans les 24 heures

