



## Como rellenar un cartucho Mastatest®

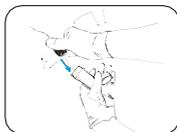


Tomar una muestra limpia de leche




Con guantes, sacar el cartucho de su envoltorio individual

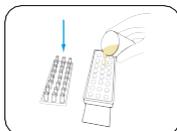


Quitar la tapa y rellenar el cartucho con la leche hasta la mitad

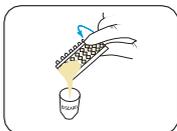

Eliminar el sobrenadante

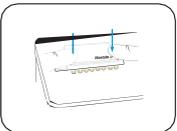

Colocar otra vez la tapa empujando formemente para cerrar y etiquetar la muestra

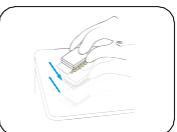

Golpear con firmeza 2-3 veces para eliminar las burbujas de aire de los pocillos. Repetir hasta que no haya ninguna



Colorar el cartucho en el labbox con las flechas hacia la parte posterior del mismo y coloca la tapa del labbox.



[vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](http://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

## Comenzar un Mastatest®

### Comenzar:

- Desde el menú principal del Labox seleccionar **Start Mastatest**
- Seleccionar la posición en el Labox: si está libre la primera o desplazarse seleccionar y

### Opción 1: BoxStart

- Seleccionar el tipo de cartucho:
  - Para Mastitis clínicas
  - Para HiSCC
- Seleccionar **BoxStart**
- Introducir la identificación de la vaca y desplazarse seleccionar el cuarto
- Confirmar el inicio

### Opción 2: QuickStart

- Desplazarse hacia abajo y seleccionar el tipo de cartucho:
  - Para Mastitis clínicas **QuickCM**
  - Para HiSCC **QuickSCC**
- Introducir la identificación del análisis en [vetoquinol.mastatestsystem.com](http://vetoquinol.mastatestsystem.com) antes de 21 horas

### Siguientes pasos:

- El contador muestra el tiempo restante
- Los resultados se enviarán dentro de las 24h siguientes al inicio del test
- Se pueden iniciar otros análisis de forma independiente

