




1. Draag schone handschoenen, neem de cartridge uit de folie.

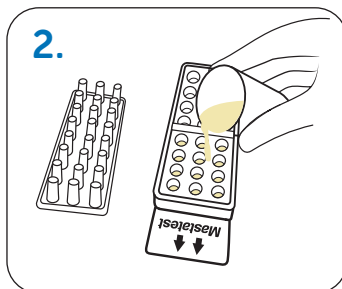


2. Verwijder het deksel en plaats ondersteboven (raak de binnenkant van het deksel niet aan). Voeg het melkstaal toe aan kamer 1 tot de wells volledig gevuld zijn.

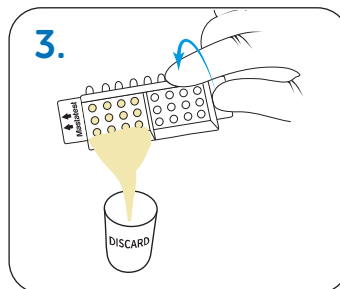


3. Giet de overtollige melk af door zijwaarts te kantelen. Zorg er voor dat het melkstaal niet in de tweede kamer komt.

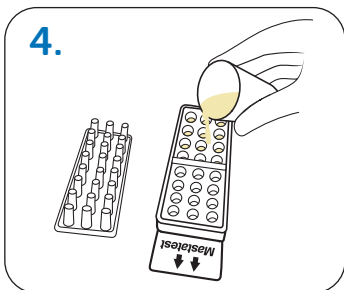


4. Voeg het tweede melkstaal toe aan kamer 2 tot de wells volledig gevuld zijn.

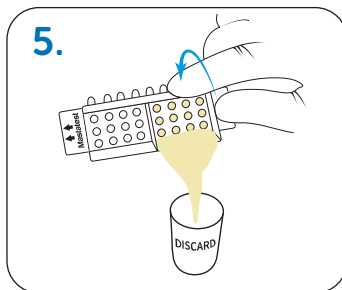


5. Giet de overtollige melk af door zijwaarts te kantelen. Zorg er voor dat het melkstaal niet in de eerste kamer komt.

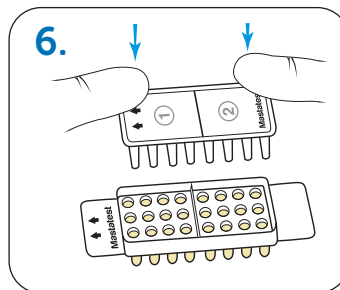


6. De pijlen van het deksel moeten gelijgeerd zijn met de pijlen op de basis. Zorg ervoor dat het deksel gecentreerd is en druk het stevig aan.

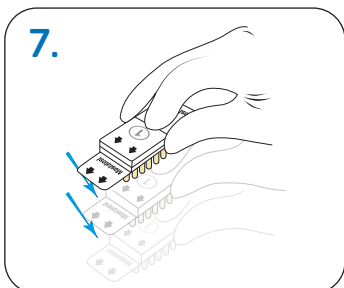


7. Tik 3-4 x met de cartridge op tafel om er voor te zorgen dat de melk op de bodem van de wells terechtkomt.

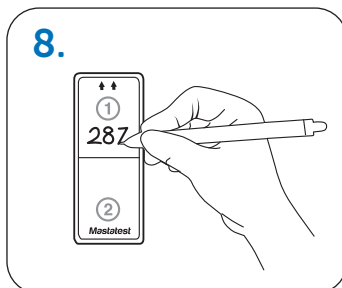

8. Noteer de koenummers op het deksel. Zorg er voor dat het koennummer overeenkomt met het melkstaal in kamer 1 en 2.

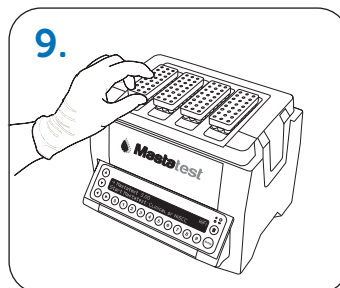

9. Plaats de cartridge terug in de Mastatest Lapbox met de QR code naar beneden en naar de achterkant van de Lapbox gericht.

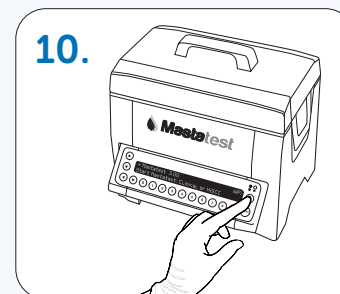

Hoe start ik de Mastatest® ?

Om te beginnen:

- Selecteer in het hoofdmenu van de Lapbox *Start Mastatest* **ENTER**
- Selecteer de gebruikte Lapbox positie: indien eerste vrije positie gebruikt, **ENTER** of scroll **ENTER** om te selecteren en druk **ENTER**

Optie 1: BoxStart

- Scroll omlaag **ENTER** selecteer *HiSCC* **ENTER**
- Selecteer *Boxstart* **ENTER**
- Geef het koennummer in (bv. 00123) en scroll omlaag **ENTER** om het kwartier te selecteren **ENTER** voor staal 1. Herhaal voor staal 2.
- Start bevestigen **ENTER**

Optie 2: QuickStart

- Scroll omlaag **ENTER** **ENTER** **ENTER** om *QuickSCC te selecteren* **ENTER**
- Voer de testgegevens zo snel mogelijk in op vetoquinol.mastatestsystem.com

Volgende stappen:

- Aftelklok toont de resterende tijd.
- Resultaten worden gemaïld binnen de 24 uur.
- Verdere testen kunnen onafhankelijk gestart worden.



vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands