




1. Usando guantes, sacar el cartucho doble (HiSCC) de su bolsa

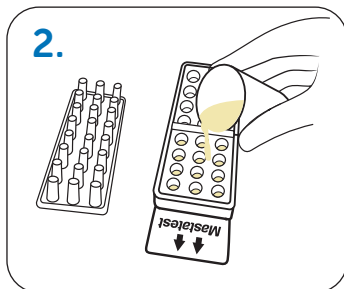


2. Quitar la tapa y dejarla hacia arriba. Rellenar la primera cámara del cartucho con la muestra número 1.

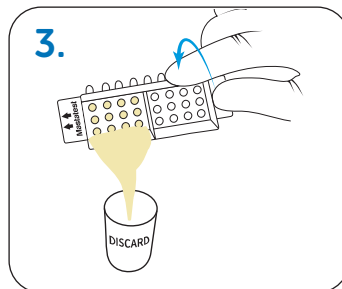


3. Retirar el sobrenadante de la cámara 1

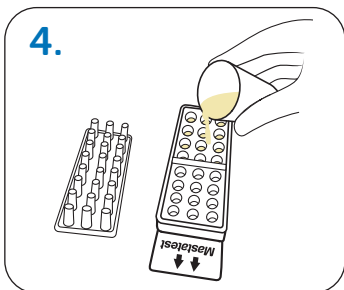


4. Rellenar la cámara 2 con la muestra de leche número 2

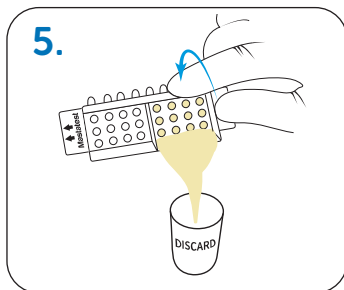


5. Retirar el sobrenadante de la cámara 2

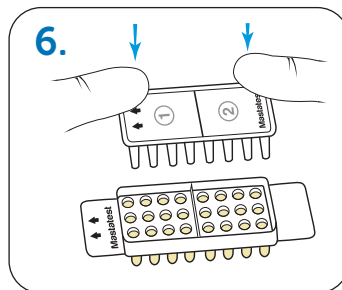


6. Colocar la tapa asegurándose de que las flechas coinciden con las flechas de la base. Apretar firmemente para cerrar

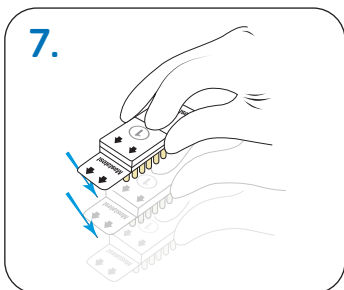

7. Golpear firmemente 2-3 veces. Repetir si se observan burbujas de aire en los pocillos

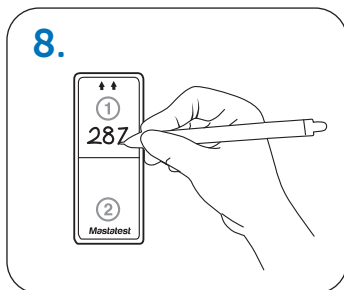

8. Identificar la tapa del cartucho con las muestras 1 y 2

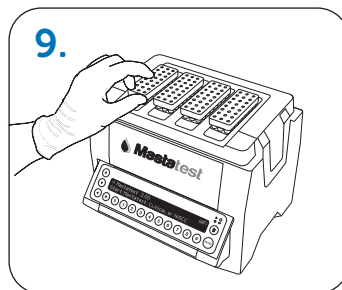

9. Colocar el cartucho en el Lapbox con las flechas hacia atrás y volver a colocar la tapa del Lapbox



Usar Mastatest®

Para empezar:

- Desde el menú principal, seleccionar **Start Mastatest** 
- Seleccionar la posición usada: Si es la primera, pulsar , desplazarse con  y seleccionar 

Opción1: BoxStart

- Desplazarse con  y seleccionar **HiSCC** 
- Seleccionar **Boxstart** 
- Introducir la ID de la vaca (e.g 00123) y desplazarse 
- Seleccionar el cuarto con  la muestra a1. Repetir para la muestra 2.
- Confirm Start 

Opción2: QuickStart

- Desplazarse    y seleccionar **QuickSCC** 
- Introducir los detalles de las muestras desde tu plataforma vetoquinol.mastatestsystem.com tan pronto como sea posible

Siguientes pasos :

- El Contador de tiempo muestra el tiempo restante.
- Los resultados se enviarán en un máximo de 24 hrs
- Se pueden realizar más pruebas de forma independiente

