






1. Mettez des gants et sortez la cassette double (HiSCC) de son emballage.

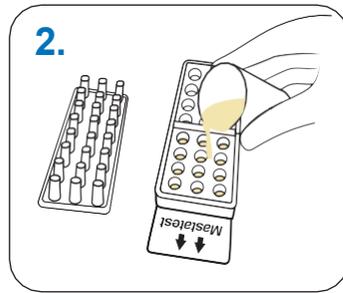


2. Retirez le couvercle et placez-le face en dessous. Replissez la moitié de la cassette avec votre premier échantillon.

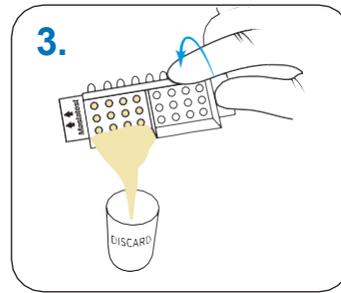


3. Déversez le surplus de lait.

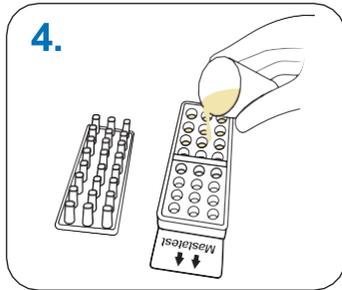


4. Remplissez la deuxième moitié de la cassette avec votre deuxième échantillon.

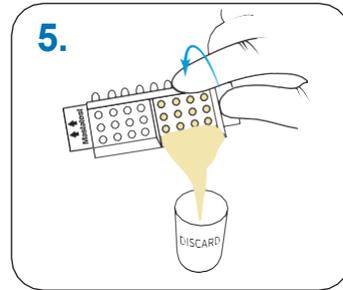


5. Déversez le surplus de lait de la deuxième moitié de la cassette.

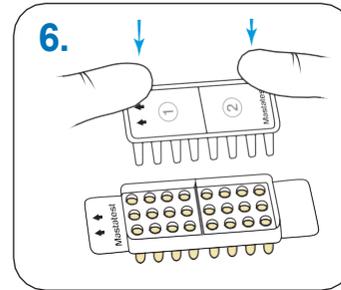


6. Remplacez le couvercle par-dessus en vous assurant qu'il soit à l'endroit. Appuyez fermement pour sceller.

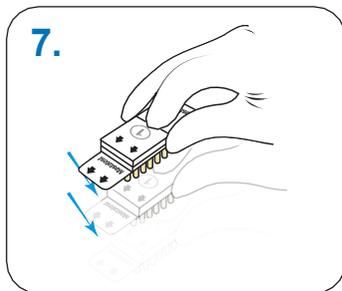

7. Tapotez fermement 2-3 fois pour homogénéiser.

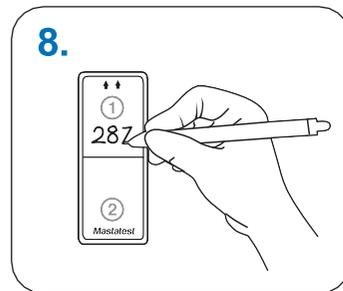

8. Notez les numéros d'animaux sur les deux moitiés.

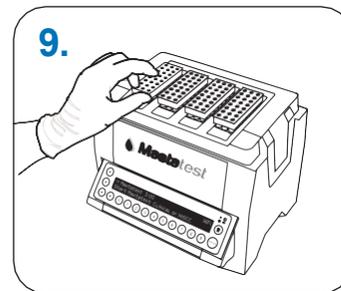

9. Insérez la cassette dans l'emplacement choisi en veillant à ce que les puits soit correctement rentrés.



Lancer un Mastatest®

Pour commencer :

- Depuis de le menu principal, sélectionnez *Démarrer le Mastatest* **ENTER**
- Sélectionnez l'emplacement choisi : Si le premier emplacement est libre, appuyez sur **ENTER** ou appuyez sur **▶** puis sur **ENTER**

Option 1: BoxStart

- Appuyez sur **▼** puis sélectionnez *HiSCC* **ENTER**
- Sélectionnez *Boxstart* **ENTER**
- Rentrez les numéros d'animaux (exemple : 00123) et descendez **▼** pour sélectionner le quartier puis appuyez sur **ENTER** pour l'échantillon 1. Répétez la même démarche pour l'échantillon 2.
- Confirmez le démarrage en appuyant sur **ENTER**

Option 2: QuickStart

- Appuyez su **▼▼▼** puis sélectionnez *QuickSCC* **ENTER**
- Entrez les détails du test sur vetoquinol.mastatestsystem.com dès que possible

Prochaines étapes:

- Un décompte s'affiche au niveau de l'emplacement choisi
- Les résultats seront disponibles sous 24h
- D'autres tests peuvent être lancés de manière indépendante

