



1. Indossare guanti puliti, rimuovere la cartuccia doppia (HiSCC) dall'involucro protettivo




2. Rimuovere il tappo e appoggiarlo capovolto. Riempire il comparto 1 con il campione di latte 1

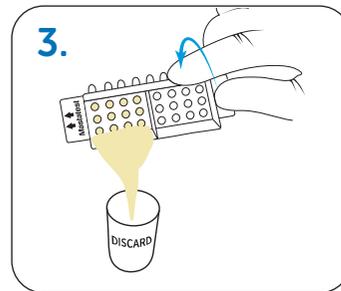


3. Versare il latte in eccesso dal comparto 1 ed eliminarlo

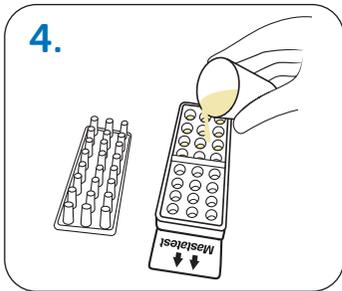


4. Riempire il comparto 2 con il campione di latte 2

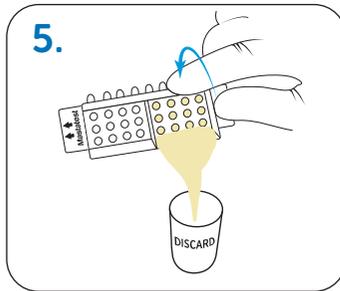


5. Versare il latte in eccesso dal comparto 2 ed eliminarlo

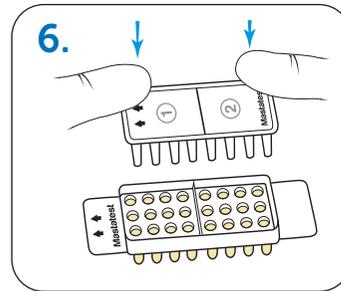

6. Riporre il coperchio, assicurandosi che le frecce siano allineate con quelle sulla cartuccia. Premere bene il coperchio per chiudere

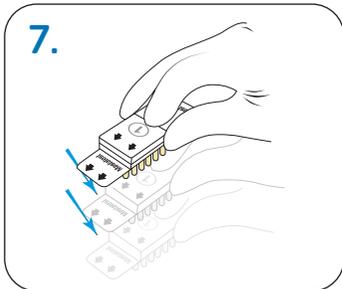

7. Battere con decisione 2-3 volte, ripetendo se vi sono bolle d'aria nei pozzetti

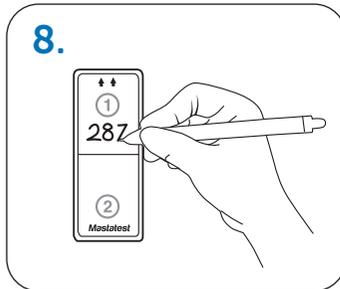

8. Riportare sul coperchio i numeri corretti delle vacche dei campioni 1 e 2



9. Inserire la cartuccia con le frecce rivolte verso il retro del Lapbox e rimettere il coperchio



Avviare un Mastatest®

Per iniziare:

- Dal menu principale, seleziona *Start Mastatest* **ENTER**
- Seleziona la postazione da utilizzare: se la prima è libera **ENTER** o scorri **▶** per selezionare e premi **ENTER**

Opzione 1: BoxStart

- Scorri in basso **▼** e seleziona *HiSCC* **ENTER**
- Seleziona *Boxstart* **ENTER**
- Inserisci il numero della vacca (es. 00123) e scorri **▼** per selezionare il quarto del campione 1. **ENTER** Ripeti per il campione 2.
- Conferma l'avvio **ENTER**

Opzione 2: QuickStart

- Scorri in basso **▼▼▼** per selezionare *QuickSCC* **ENTER**
- Inserisci i dettagli del test su vetoquinol.mastatestsystem.com il prima possibile

Step successivi:

- Un timer mostra il tempo rimanente alla conclusione.
- Risultati inviati via email entro 24 ore
- Altri test possono essere inviati indipendentemente

