




1. Załóż czyste rękawiczki i wyjmij podwójny wkład testowy (HiSCC) z opakowania.

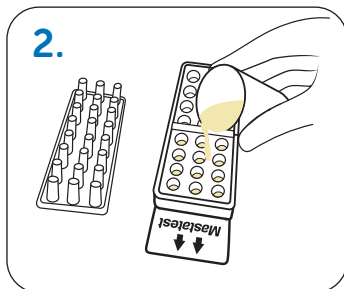


2. Zdejmij pokrywkę wkładu i połóż ją na blacie wypustkami do góry. Napelnij pierwszą część wkładu do połowy badaną próbką mleka.

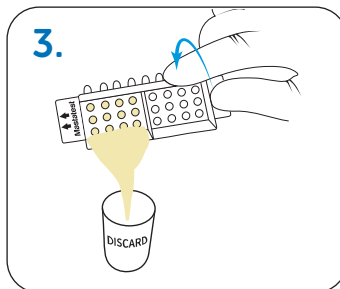


3. Odlej nadmiar mleka z napelnionej części wkładu.

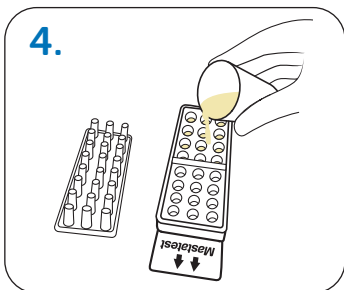


4. Wypełnij do połowy drugą część wkładu kolejną próbką badanego mleka.

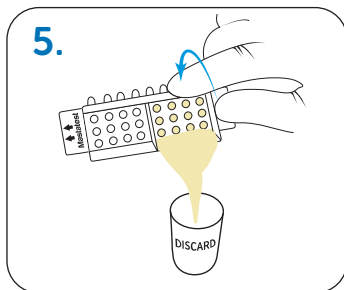


5. Odlej nadmiar mleka z drugiej napelnionej części wkładu.

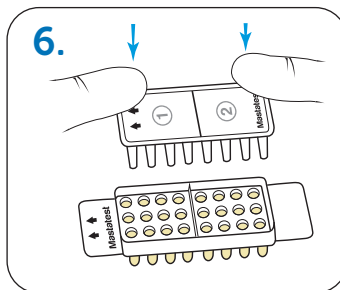


6. Nałóż pokrywkę. Upewnij się, że strzałki pokrywają się z tymi na podstawie. Naciśnij zdecydowanie, aby zamknąć wkład.

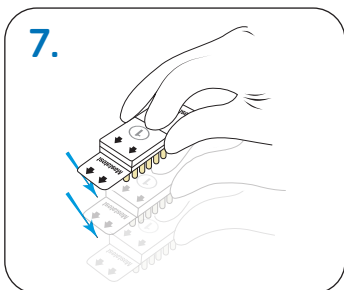

7. Postukaj wkładem o blat 2-3 razy, aby usunąć pęcherzyki powietrza.

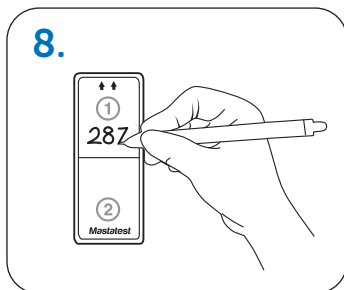

8. Oznacz pokrywkę wkładu odpowiednimi numerami krów dla próbek 1 i 2.

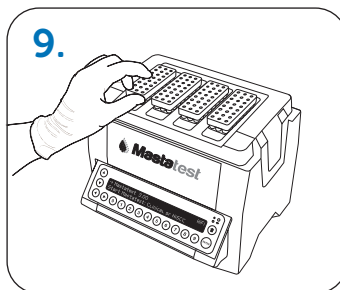

9. Włóż wkład testowy do Lapbox strzałkami skierowanymi w tył. Załóż pokrywkę.



Start analizy Mastatest®

Początek:

- Z menu głównego Lapbox wybierz **Start Mastatest**
- Wybierz pozycję testu: Jeśli będzie to pierwsza wolna , lub nawiguj żeby wybrać inną i potwierdź

Opcja1: BoxStart

- Naciśnij żeby wybrać **HiSCC**
- Wybierz **Boxstart**
- Wpisz numer krowy (np. 00123) i dalej żeby wybrać ćwiartkę
- Potwierdź Start

Opcja2: QuickStart

- Naciśnij żeby wybrać **QuickSCC**
- Uzupełnij szczegóły testu w portalu vetoquinol.mastatestsystem.com tak szybko jak to możliwe

Kolejne kroki:

- Zegar będzie odliczał czas pozostały do zakończenia testu
- Wyniki będą dostarczone mailem w ciągu 24 godz.
- Kolejne testy mogą być wykonywane niezależnie

