




1. Calce luvas limpas e retire um cartucho duplo (HiCCS) da embalagem

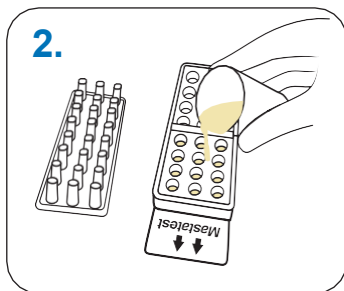


2. Remova a tampa do cartucho e coloque-o virado para baixo. Encha a câmara 1 até meio com a amostra de leite 1

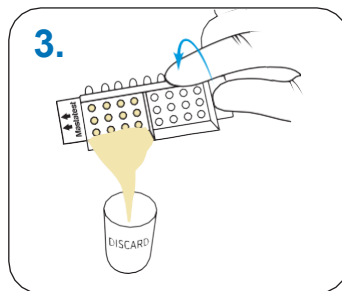


3. Retire o leite excedente da câmara 1 e descarte

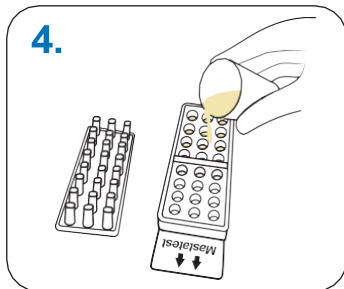


4. Encha a câmara 2 até meio com a amostra de leite 2

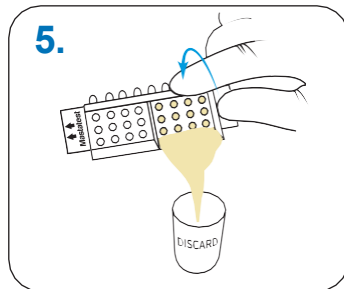


5. Retire o leite excedente da câmara 2 e descarte

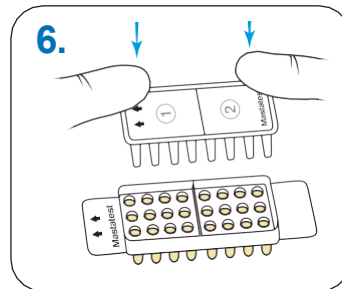

6. Volte a colocar a tampa, certificando-se de que as setas estão alinhadas com as da base. Pressione firmemente para fechar.

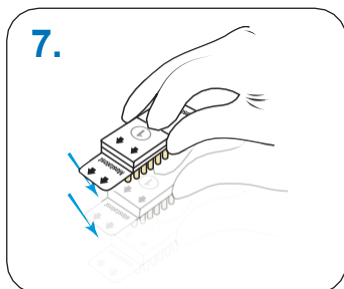

7. Bata firmemente 2-3 vezes, repetindo a operação se forem visíveis bolhas de ar nos poços

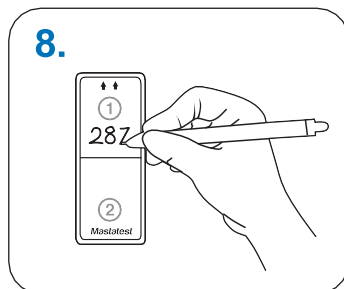

8. Identifique a tampa do cartucho com os números de vaca correspondentes para as amostras 1 e 2



9. Insira o cartucho na Lapbox com as setas viradas para trás e volte a colocar a tampa



Iniciar o Mastatest®

Para começar:

- No menu principal da Lapbox, selecione **Iniciar Mastatest** **ENTER**
- Selecione a posição da Lapbox utilizada: Se a primeira estiver livre clique **ENTER** ou pressione **ENTER** para selecionar e **ENTER**
- Opção 1: BoxStart**
- Pressione **ENTER** para selecionar **HiCCS** **ENTER**
- Selecione **Boxstart** **ENTER**
- Introduza o número da vaca (e.g 00123) e pressione **ENTER** para selecionar o **ENTER** quarto para a amostra 1. Repita para amostra 2.
- Confirme o início **ENTER**

Opção 2: QuickStart

- Pressione **ENTER** **ENTER** **ENTER** para selecionar **QuickCCS** **ENTER**
- Introduza os dados do teste em vetoquinol.mastatestsystem.com assim que possível.
- Passos seguintes:**
- O temporizador de contagem decrescente mostra o tempo restante
- Os resultados são enviados por email no prazo de 24 horas
- Podem ser iniciados outros testes de forma independente

